

電動車いすバッテリーコネクタに関するお願い

電動車いすのバッテリー接続コネクタにつきまして、使用上ご注意頂きたい内容を下記にご案内させていただきます。

なお、車いすの販売は2018年9月にて終了させて頂いておりますが、補給部品および修理対応につきましても、下記のように終了させていただきます。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

記

1. ご使用上のご注意

1) バッテリー接続コネクタ接続時の装着音について

バッテリーにコネクタを接続する際、レバー部（別紙“1”参照）より「カチッ」という装着音が出ない場合や以前よりも装着しづらくなった場合には、レバー部の劣化が考えられますので、新品への交換をお願い致します。なお、交換部品につきましては機種またはコネクタ部の形状により変わりますので別紙“2”を参照ください。

2) 背シートの留め方について

バッテリーのコネクタ部を上にしてご使用の場合、バッテリーからコネクタが外れる場合がありますので、カバーを強く引っ張らず留めてください（別紙“3”参照）。

2. 補給部品および修理の終了時期について

・キャストの供給 ; 2025年2月

・キャスト以外の補給部品供給 : 2024年9月

※以降の対応は修理を含め出来かねますので、お乗り換えを含めご検討をお願い致します。

3. 本件に関するお問合せ先

株式会社アイシン お客様相談室


フリーダイヤル 0120-24-8640

受付時間 平日 9:00~17:00

※土日・年末年始・ゴールデンウィーク・夏季休暇は除く

以上

1. バッテリー接続コネクタ レバー部

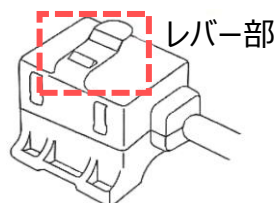

2. PC20とPC20Mの見分け方（シートの色による見分け方）

機種名	シートの色	
	全面	ふちどり
PC20	灰色	黒色
PC20M	黒色	赤色

バッテリー接続コネクタによる見分け方と交換頂く部品

見分け方		交換頂く部品	
機種	コネクタ形状	部品名	品番
PC20	 端子5本		561384-11040
PC20M	 端子2本	 PC20M用バッテリーハーネスコネクタ	561308-10020

3. 背シートカバーを強く引っ張り留めた状態

	PC20	PC20M
適正な状態	 コネクタの跡が見えない	 カバー上部のプレート跡が見えない
強く引っ張り留めた状態	 コネクタの跡が見える	 カバー上部のプレート跡が見える